

内部培训资料
仅供公司员工及代理商下载学习使用



高速气涡轮手机

S-Max M 系列

NEW

NEXT STAGE


S-Max系列高速气涡轮手机实现了产品升级
其高效稳定的切割力可满足操作者的多样化需求
NSK畅销机型您值得拥有



动力更强劲

运用先进的流体模拟软件研发出了控制给排气的“3X动力系统”。由此，能够有效地将气流转换为旋转力，实现了功率从20W到26W的显著升级*。使手机能让术者拥有随心所欲的操作感，并能在治疗中得到更精细的切削效果。纤细的机身蕴含着NSK手机专家多年来积累的专业知识和技术。*M900L

●与本公司以往产品的功率比较(本公司调查)

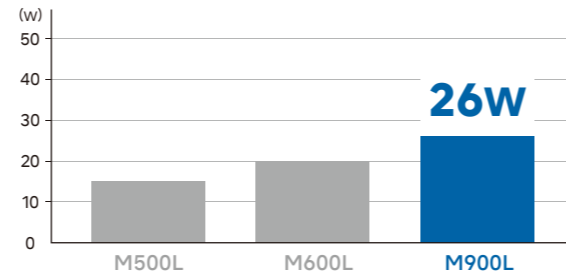

3X-Power System (3X动力系统)



Extended Cylindrical Nozzle

加长型圆柱喷嘴

通过优化喷嘴结构以产生均衡的气流流动来减少空气损失。高效地将气流转化为旋转力。



Expanded Rotor Bucket

加大型转子叶片

通过宽大的转子叶片充分地接收气流，接受气流的面积比以往增大100% (2倍) 以实现高扭矩。



Expanded Exhaust Groove

加大型排气槽

加大的排气槽使转子接受的气流迅速排出。平稳的排气实现了低转速时获得高扭矩。

耐久性

陶瓷球形轴承

陶瓷球比钢硬约 25%，重量约为一半，可减少磨损，延长轴芯的使用寿命

按钮式换针

轻巧且易于按下的按钮让装卸车针变得轻松。此外，即使对车针上施加高负荷时，它也能稳固地抓持。耐久性十分出色。

三步轻松更换轴芯

高速气涡轮手机的轴芯可以轻松更换。节省修理时间的同时，并能确保手机可以在良好的状态下供手术使用。

4点注水喷雾

通过对整个车针进行喷雾，实现高效冷却效果。

卫生机头系统

防止口腔内的血液、异物等进入头部的防回吸结构。因异物无法进入头部，所以提升了轴承的使用寿命。

全不锈钢制机身

机身采用了不生锈且结实的不锈钢。机身表面可与手部很好的贴合。

机身内部结构更新升级

通过采用新的内部结构，实现了更高的耐久性并且支持热清洗和高压灭菌。



产品系列



- 不锈钢机身
- 陶瓷轴承
- 光导玻璃体
- 卫生机头系统
- 按钮式换针
- 可更换轴芯
- 3X动力系统
- 四点喷雾



迷你型机头

功率：23 W
转速：380,000-450,000 min⁻¹
机头尺寸：ø10.6 × H 12.4 mm

带光纤	型号	订货编号
●	M800L	P1253

国械注进20142175837



标准型机头

功率：26 W
转速：325,000-430,000 min⁻¹
机头尺寸：ø12.1 × H 13.3 mm

带光纤	型号	订货编号
●	M900L	P1254

国械注进20142175837

NSK 快插接口



带光纤	型号	订货编号
●	PTL-CL-LED	P1001600

·钛金属涂层 ·内置LED ·不锈钢机身 ·逆止阀

备件

型号	产品	订货编号
SX3-MU03 迷你型用轴芯		P1280
SX3-SU03 标准型用轴芯		P1281
SX-MU04 迷你型用机头帽盖		P1001500
SX-SU04(YOS) 标准型用机头帽盖		P1027500

型号	产品	订货编号
O型密封圈 轴芯用 迷你型前侧		D0312049030
O型密封圈 轴芯用 迷你型后侧 / 标准型前侧		D0312069030
O型密封圈 轴芯用 标准型后侧		D0312077030
O型密封圈 帽盖用 迷你型 / 标准型		D0312090040

型号	产品	订货编号
PTL O型圈套装 (5只 / 套)		Y900580
SX-SU05 迷你型 / 标准型用 帽盖扳手		20000535

生产企业/注册人
株式会社 中西 www.nsk-dental.com
邮编322-8666 日本国栃木县鹿沼市下日向700
电话: +81 289 64 3380 传真: +81 289 62 5636

NSK中国代理人(中国分公司)
上海弩速克国际贸易有限公司 www.nsk-shanghai.com
邮编200051 中国上海市长宁区紫云路421号SOHO天山广场T1-702室
电话: +86 21 6252 7272 传真: +86 21 6252 7855

产品的规格、式样发生变化时, 恕不另行通知, 敬请谅解。

